

Sureband<sup>MC</sup>

## Nous vous présentons le ligateur à bandes multiples

qui est sans latex, simple, rapide, fiable et prêt à utiliser.



Plus efficace cliniquement et plus facile à utiliser, l'ensemble de ligature Sureband<sup>MC</sup> est meilleur tant pour les chirurgiens que pour leurs patients.

Conçu par des chirurgiens pour des chirurgiens, Sureband<sup>MC</sup> rend les procédures de ligature plus confortables pour les patients, plus efficaces pour les chirurgiens et plus faciles pour les infirmières.

Conçu pour être utilisé avec un anoscope ordinaire



## Plus efficace cliniquement

L'ensemble pour la ligature des hémorroïdes Sureband<sup>MC</sup> est très efficace cliniquement. Sa poignée à actions multiples signifie que vous n'avez besoin que d'une seule main pour contrôler la succion, relâcher les bandes puis recharger. Cela libère votre autre main pour tenir un protoscope et signifie que vous pouvez travailler seul. La conception du Sureband<sup>MC</sup> vous permet des applications plus précises, réduisant ainsi le besoin pour des procédures additionnelles.

## Meilleurs résultats pour le patient

Le temps de la procédure étant raccourci et avec les bandes sans latex, le Sureband<sup>MC</sup> améliore considérablement le confort du patient et le fait qu'il soit jetable élimine les risques de contaminations croisées.

## Prêt à utiliser

Le fusil Sureband<sup>MC</sup> est prêt à utiliser directement à partir du cabaret étanche et propre. Équipé avec un anoscope et un guide de lumière, il n'y a aucune pièce qui peut être perdue ou à ajuster / insérer et le seul équipement supplémentaire dont vous avez besoin est la succion standard de l'hôpital ainsi qu'un illuminateur.

## Plus facile, plus rapide

Puisque le fusil est pré-chargé, déjà propre et peut être utilisé avec une seule main, le temps moyen pour une procédure de ligature peut être réduit de 20 minutes à 2 à 4 minutes pour l'application de bandes jusqu'à 3 hémorroïdes. De plus, lorsqu'acheté en ensemble, l'anuscope illuminé diffuse la lumière exactement où vous en avez besoin

Pré-chargé avec 4 bandes sans latex. La buse profonde offre un maximum de pression de succion pour une application plus précise.



Sonde d'insertion mince de 120 millimètres

Une poignée à actions multiples innovatrice contrôle la succion et tire et recharge les bandes



# Le ligateur multi-bandes révolutionnaire

disponible avec un anoscope illuminé

## Une buse transparente

La clarté de l'embout maximise la visibilité durant toute la procédure. Pré-chargé avec 4 bandes vertes sans latex. La buse profonde permet une pression de succion optimale pour une ligature plus précise.

## Bandes moulées vertes sans latex

Chaque bande est moulée individuellement pour créer des contours ronds, ce qui signifie que l'anneau de caoutchouc roule facilement sans se tordre. Cela assure un relâchement plus fiable en plus d'un ajustement sécuritaire sur le tissu.

La poignée innovatrice à action multiple contrôle la succion, tire et recharge les bandes. La ligne de déclenchement par étapes guide l'utilisateur durant chaque étape de l'application.

### Sureband<sup>MC</sup> (ligateur seulement)

Code de produit : 40810 - Quantité par caisse : 10

### Sureband<sup>MC</sup> Kit


Inclut le Sureband<sup>MC</sup> ainsi que des anoscopes moyens et des guides de lumière

Code de produit : 40811C - Quantité par caisse : 5

### Sureband<sup>MC</sup> Kit

Inclut le Sureband<sup>MC</sup> ainsi que de grands anoscopes et des guides de lumière

Code de produit : 40811-3C - Quantité par caisse : 5

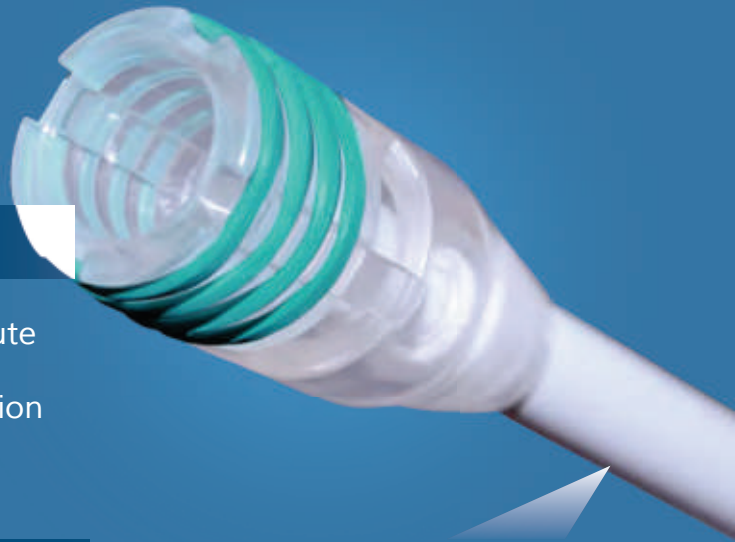

Canon fin de 120 mm



Distribué par :

**ORION**<sup>TM</sup>  
C O N C E P T S

orionconceptsinc.com

Fabricant des manches de laryngoscopes à fibre optique au DEL GreenStar